

FOTOGLOSS

Conteúdo: O produto é apresentado para comercialização acondicionado em seringa de polipropileno (embalagem primária) contendo 2g da pasta, para depois ser acondicionado em blister de PVC (embalagem secundária).

Composição: Ultrapeg, Etileno Glicol, Carbonato de Cálcio, Quartzo Micronizado, Diamante em pó.

Indicações de Uso: A pasta Fotogloss é indicada para o polimento de restaurações em resina foropolimerizável.

A Fotogloss é uma pasta para polimento à base de carbonato de cálcio e quartzo micronizado, ambos agentes abrasivos e de perolização, que ao entrarem em atrito com superfícies recém-restauradas proporcionam polimento e brilho.

O produto é atóxico, não irritante à mucosa oral e solúvel em água. Os ingredientes presentes em sua composição auxiliam na lubrificação durante o polimento, minimizando a geração de calor, e facilitando a remoção do produto ao final do procedimento.

Instruções de Uso:

Após realizar o acabamento com pontas diamantadas ou brocas multilaminadas, utilizar as pastas sequenciais POLI I e POLI II para polimento em resina composta, com o auxílio de feltros e mini mandril em contra ângulo de baixa rotação. Lavar abundantemente para remover os resíduos das pastas POLI I e POLI II.

Em seguida, utilize uma pequena quantidade da pasta FOTOGLOSS em outro feltro montado em micromotor, realizando movimentos leves em baixa rotação sobre a superfície até atingir o brilho desejado. Ao final, remover o produto com água sem deixar resíduos.

Advertências e Precauções:

Conservar o produto em local seco e arejado.

Conservar ao abrigo da luz e do calor.

Manter o produto em sua embalagem original.

Manter o produto fora do alcance das crianças.

Manipular apenas em baixa rotação, e descartar o feltro após o uso.

Armazenamento e Conservação:

Conservar o produto em local seco e arejado.

Conservar ao abrigo da luz e do calor.

Manter o produto em sua embalagem original.

Prazo de Validade: 02 anos após a data de fabricação.

Contraindicações e Efeitos Adversos:

O produto não apresenta restrições de uso, no entanto recomenda-se que seu uso fique restrito aos profissionais da área odontológica.

O produto não apresenta contraindicações, quando utilizado para a finalidade a qual se destina, seguindo as suas instruções de uso.

Fabricado e Distribuído por:

KOTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP

CNPJ: 68.174.788/0001-96

Rua Inácio Cervantes, 1019 – Parque Ipê

São Paulo – SP, Brasil – CEP 05572-000

RT: Dra. Glauca Kazumi Kobo Tamake – CRO-SP 17508

Notificação ANVISA nº 10370549002

SAC: +55 11 4615-9200 – sac@kotaimp.com.br

Vide Instruções de Uso ou acesse: kotaimp.com.br