

CERA BRANCA PARA AMARRILHO KOTA

INDICAÇÕES E FINALIDADE DO USO:

A Cera Odontológica é indicada para colocação no amarelo ou braquetes com finalidade de proteger a mucosa da bochecha que está em contato com o braquete ou amarelo.

COMPOSIÇÃO:

Parafina, Cera Natural e Vaselina Sólida.

CONTEÚDO:

Caixa de Cera contendo 6 bastões ou caixa de cera contendo 10 unidades com 6 bastões cada.

INSTRUÇÕES DE USO:

Reserve a quantidade necessária e coloque sobre o amarelo. Retire o excesso.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

Manter o produto em sua embalagem original.

Manter o produto fora do alcance das crianças.

CONTRAINDICAÇÕES

Não apresente contra-indicações, desde que seguido adequadamente estas instruções de uso.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar o produto em local seco e arejado, ao abrigo da luz e do calor.

FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:

KOTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP

CNPJ: 68.174.788/0001-96 AFE nº 1.03.705-4

Rua Inácio Cervantes, 1019 | Jardim Ipê | São Paulo – SP | CEP: 05.572-000

SAC: +55 11 4615 9200 | sac@kotaimp.com.br

Responsável Técnica: Dra. Gláucia Kazumi Kobo Tamake – CRO/SP 17508

Registro ANVISA nº 10370540022

Validade: 05 anos após a data de fabricação descrita na embalagem do produto.