

CERA PERIFÉRICA KOTA PARA BORDA DE MOLDEIRA

INDICAÇÕES E FINALIDADE DO USO:

Indicada para ser colocada em toda a extensão da borda da moldeira, protegendo o paciente do impacto no decorrer da moldagem.

COMPOSIÇÃO: Parafina, vaselina líquida e corante.

CONTEÚDO: Cera Periférica nº 6 contendo 40 bastões ou Cera Periférica nº 7 contendo 28 bastões.

INSTRUÇÕES DE USO:

Colocar o bastão de cera em toda a extensão da borda da moldeira, moldando uniformemente;
Recortar o excesso de cera;
Em seguida fazer a moldagem com o alginato.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

Conservar em local seco e arejado, ao abrigo de luz e do calor.
Manipular delicadamente.
Manter o produto em sua embalagem original até o momento do uso.

CONTRAINDICAÇÕES

O produto não apresenta contraindicações, desde que seguido corretamente suas instruções de uso.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Produto não necessita de cuidados especiais, somente conservar em local seco, fresco e arejado, ao abrigo da luz e do calor.
A Cera Periférica nº 6 e 7 não apresenta restrições de uso, porém, o mesmo deverá ser utilizado por profissional da área odontológica.
Sempre manipular delicadamente e manter na embalagem original.

FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:

KOTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP

CNPJ: 68.174.788/0001-96 AFE nº 1.03.705-4

Rua Inácio Cervantes, 1019 | Jardim Ipê | São Paulo – SP | CEP: 05.572-000

SAC: +55 11 4615 9200 | sac@kotaimp.com.br

Responsável Técnica: Dra. Gláucia Kazumi Kobo Tamake – CRO/SP 17508

Registro ANVISA nº 10370540041

Validade: 05 anos após a data de fabricação prevista na embalagem.