

#### KOTAFIX

#### **INDICAÇÕES E FINALIDADE DO USO:**

O produto KOTAFIX é indicado para auxílio na cimentação de laminados, Inlay, Onlay, bordas e pequenos objetos. Tem como finalidade levar as peças até o local do dente preparado, onde será cimentado.

**COMPOSIÇÃO:** Bastão de polipropileno, cera de abelha e parafina.

**CONTEÚDO:** 15 bastões de 6,5 cm.

#### **INSTRUÇÕES DE USO:**

Dobre o bastão de 4 a 5 vezes e gire até destacar da cartela. Fixar os laminados pela vestibular para cimentação. Fixar o Inlay, Onlay pela oclusal dobrando o bastão de 80° a 90° para cimentação.

#### **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:**

O KOTAFIX não apresente restrições de uso, porém, deve ser utilizado por profissional da área odontológica. O produto deverá ser utilizado somente para este fim, evitando atritos mais fortes para que não se altere a sua forma original.

#### **CONTRAINDICAÇÕES**

O produto não apresenta contraindicações, desde que seguido corretamente suas instruções de uso.

#### **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

Para que o produto mantenha sua eficácia, manter em local fresco e arejado, longe do calor e de chamas. Sempre manipular delicadamente e manter na embalagem original.

#### **FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:**

KOTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP

CNPJ: 68.174.788/0001-96                      AFE nº 1.03.705-4

Rua Inácio Cervantes, 1019 | Jardim Ipê | São Paulo – SP | CEP: 05.572-000

SAC: +55 11 4615 9200 | sac@kotaimp.com.br

Responsável Técnica: Dra. Gláucia Kazumi Kobo Tamake – CRO/SP 17508

Registro ANVISA nº 10370540043

Validade: 05 anos de validade após a data de fabricação descrita na embalagem do produto.