

#### MINI RODA DE FELTRO KOTA

**INDICAÇÕES E FINALIDADE DO USO:** O produto é utilizado para promover o acabamento e/ou polimento de dentes ou próteses odontológicas. Indicado para procedimento intrabucal e extrabucal, utilizado em conjunto com mandril e pastas de polimento em geral.

**COMPOSIÇÃO:** Feltro.

**CONTEÚDO:** 12 unidades.

#### **INSTRUÇÕES DE USO:**

Montar a roda de feltro na ponta do mandril em contra ângulo. Operar em baixa rotação. Após o uso, descartar o produto em local apropriado.

#### **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:**

Não utilizar em alta rotação, somente em contra ângulo. O produto deve ser utilizado para a finalidade a qual se destina, seguindo suas instruções de uso.

#### **CONTRAINDICAÇÕES:**

O produto não apresenta contraindicações, quando utilizado para a finalidade a qual se destina, seguindo suas instruções de uso.

#### **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

O produto não necessita de cuidados especiais, conservar em local seco e arejado. Recomenda-se mantê-lo em sua embalagem original.

Após o uso, desparafusar e descartar a roda de feltro em local apropriado.

#### **FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:**

KOTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP

CNPJ: 68.174.788/0001-96 AFE nº 1.03.705-4

Rua Inácio Cervantes, 1019 | Jardim Ipê | São Paulo – SP | CEP: 05.572-000

SAC: +55 11 4615 9200 | sac@kotaimp.com.br

Responsável Técnica: Dra. Gláucia Kazumi Kobo Tamake – CRO/SP 17508

Registro ANVISA nº 10370540061

Validade: 05 anos após a data de fabricação descrita na embalagem.