

#### SUPER FILME

O Super Filme Kota é um produto de origem nacional fabricado pela KOTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e consiste em 02 frascos: 01 de Carbono Líquido e 01 de solvente.

O produto é um carbono líquido fácil de usar, não tóxico, de coloração azul e pode ser usado tanto em consultório como no laboratório de prótese.

#### **INDICAÇÕES E FINALIDADE DO USO:**

O produto é indicado para ajuste de pontos de contato, oclusão, jaquetas puras de cerâmica, inlays, onlays, interferências nos movimentos excursivos dos dentes naturais, metais ou porcelanas, ajuste interno de coroa metálica, prótese fixa, faceta laminada e núcleo.

**COMPOSIÇÃO DO CARBONO LÍQUIDO:** Álcool etílico, pigmento azul, dióxido de titânio, álcool isopropílico, óleo mineral (vaselina líquida), etilenoglicol e polisorbato 80.

**COMPOSIÇÃO DO SOLVENTE:** Álcool etílico, álcool isopropílico, óleo mineral (vaselina líquida), etilenoglicol e polisorbato 80.

#### **CONTEÚDO:**

01 frasco de Carbono Líquido contendo 10 ml;

01 frasco de Solvente contendo 20 ml.

#### **INSTRUÇÕES DE USO:**

Dentistas: use no caso de ajuste interno e proximal de próteses.

Super filme Kota é facilmente retirado. Basta água de seringa tríplice.

Protéticos: usar em troques.

Nos casos de ajustes interno e proximal de próteses (troques, jaquetas, inlays, onlays, facetas laminadas), núcleos e nos casos de ajuste de contato oclusal prematuro, considerar o modo de uso:

Passar o Carbono Líquido na parte interna da coroa. Aguardar 5 a 10 segundos para o produto secar (a superfície perde o brilho). Em seguida levar a peça até o preparo e onde houver interferência o carbono se soltará, mostrando o local exato para o desgaste. O Super Filme Kota é facilmente retirado com água e no consultório utilizar a água da seringa tríplice.

#### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

Produto não necessita de cuidados especiais. Armazenar em local seco, arejado e ao abrigo da luz e calor.

#### **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:**

O produto não apresenta restrições de uso, no entanto recomenda-se que fique restrito a profissionais da área odontológica.

O produto deve ser armazenado em local fresco, arejado, longe do calor.

Para conservar sua qualidade, o produto deve ser mantido em sua embalagem original e bem tampado.

Se o Carbono Líquido ficar espesso, basta acrescentar gotas do solvente e agitar até obter a consistência inicial.

Em casos de contato com a pele e a mucosa, enxaguar com água e para casos de ingestão acidental, procurar auxílio médico.

#### **CONTRAIINDICAÇÕES:**

O produto não apresenta contraindicação quando utilizado para a finalidade a que se destina, seguindo suas instruções de uso.

#### **FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:**

KOTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP

CNPJ: 68.174.788/0001-96                      AFE nº 1.03.705-4

Rua Inácio Cervantes, 1019 | Jardim Ipê | São Paulo – SP | CEP: 05.572-000

SAC: +55 11 4615 9200 | sac@kotaimp.com.br

Responsável Técnica: Dra. Gláucia Kazumi Kobo Tamake – CRO/SP 17508

Registro ANVISA nº 10370540070

Validade: 03 anos após a data de fabricação.